

Anweisungen

Mit ihrer Bodywear möchte Javita die sichere Verwendung von PD-Kathetern fördern und den Anwendern maximalen Tragekomfort bieten. Gebrauchsanweisungen sind wichtig und deshalb stellen wir diese in mehreren Sprachen für verschreibende Ärzte, Betreuer, Anwender und Interessierte zur Verfügung.



1.



2.



3.

1. Der Gürtel mit Klettverschluss um das Taille befestigen
2. Das Ende des Mini-Sets im Etui aufbewahren
3. Schließen Sie den Klettverschluss, damit das Mini-Set fest sitzt

Informationen

Dieser Gürtel besteht aus einem elastischen Band, das sich aus Polyamid und Elasthan zusammensetzt, wobei der verwendete Klettverschluss aus Polyester besteht. Das Etui, in welchem Mini-Set aufbewahrt werden kann, besteht aus Bio-Baumwolle.

Waschanleitung

Bei maximal 40°C waschen, der PD-Gürtel sollte nicht im Trockner getrocknet werden. Der Klettverschluss sollte beim Waschen richtig geschlossen sein.



Haben Sie irgendwelche Fragen?

Schauen Sie auf der Website unter FAQ nach. Dort finden Sie Antworten auf häufig gestellte Fragen. Ihre Frage ist dort nicht aufgeführt? Bitte senden Sie uns eine E-mail an info@javita.nl.

Deine Erfahrung

Wenn Sie Ihre Erfahrungen und/oder Ihr Feedback mit uns teilen möchten, würden wir uns freuen, von Ihnen über info@javita.nl zu hören. Ihre Antwort ist für uns sehr wertvoll und wird von uns sehr geschätzt, damit wir noch besser auf die Wünsche unserer Nutzer eingehen können.

Größe	Taillenumfang (cm)
XXS	55 – 60
XS	60 – 65
S	65 – 80
M	80 – 95
L	95 – 110
XL	110 - 130
XXL	130 - 150