

## Gebruiksaanwijzing


Javita wil met haar bodywear het veilig PD-katheter gebruik bevorderen en zorgen voor maximaal draagcomfort voor de gebruikers. Gebruiksaanwijzingen zijn belangrijk en daarom geven wij deze in meerdere talen voor voorschrijvers, verzorgers, gebruikers en geïnteresseerden.



1.



2.

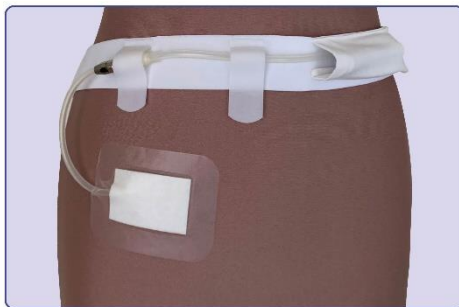

3.

1. De riem met klittenband om het middel bevestigen
2. Het uiteinde van de Miniset opbergen in het hoesje
3. Het klittenband sluiten zodat de Miniset is gefixeerd

## Technische informatie

Deze riem bestaat uit een elastische band gemaakt van polyamide en elasthan. Het klittenband is gemaakt van polyester. Het hoesje waarin de Miniset opbergen kan worden is gemaakt van biologisch katoen.

## Wasvoorschrift

Wassen op maximaal 40°C, de PD-Riem kan niet in de droger gedroogd worden. Het klittenband dient tijdens het wassen goed gesloten te worden.



### Heeft u vragen?

Kijk dan op de website bij FAQ, Meest gestelde vragen. Veel vragen zijn daar al door ons beantwoord. Meer vragen?  
Laat het ons weten via [info@javita.nl](mailto:info@javita.nl).

## Uw ervaringen

Als u uw ervaringen en/of feedback met ons wilt delen, horen wij dat graag via [info@javita.nl](mailto:info@javita.nl). Uw reactie is voor ons heel waardevol en wordt zeer gewaardeerd, om zo nog beter te kunnen inspelen op de wensen van onze gebruikers.

Maat	Tailleomvang (cm)
XXS	55 – 60
XS	60 – 65
S	65 – 80
M	80 – 95
L	95 – 110
XL	110 - 130
XXL	130 - 150