

Talimatlar

Javita, vücut giyimiyle güvenli PD kateter kullanımını teşvik etmek ve kullanıcılara maksimum kullanım rahatlığı sağlamak istiyor. Kullanım talimatları önemlidir ve bu nedenle bunları reçete yazanlar, bakıcılar, kullanıcılar ve ilgili taraflar için birden fazla dilde sunuyoruz.



1.



2.



3.

1. Kemerini bel çevresine Velcro ile sabitleyin
2. Minisetin ucunu tünelde saklayın
3. Minisetin sabitlenmesi için Velcro'yu kapatın

Teknik Bilgiler

Bu kemer poliamid ve elastandan yapılmış elastik bir banttandır. Velcro polyesterden yapılmıştır. Minisetin saklanabileceği çanta organik pamuktan yapılmıştır.

Yıkama talimatları

Maksimum 40°C'de yıkayın, PD-kemer kurutucuda kurutulamaz. Velcro yıkama sırasında düzgün bir şekilde kapatılmalıdır.



Sorunuz var mı?

Daha sonra web sitesini en sık sorulan sorular bölümünden kontrol edin. Orada zaten birçok soruya cevap verdik. Daha çok sorunuz varsa; info@javita.nl aracılığıyla bize bildirin.

Deneyimleriniz

Deneyimlerinizi ve/veya geri bildirimlerinizi bizimle paylaşmak isterseniz info@javita.nl aracılığıyla sizden haber almak isteriz. Yanıtınız bizim için çok değerli ve kullanıcılarımızın isteklerine daha iyi yanıt verebilmemiz için çok takdir ediliyor.

Mat	Bel çevresi (cm)
XXS	55 – 60
XS	60 – 65
S	65 – 80
M	80 – 95
L	95 – 110
XL	110 - 130
XXL	130 - 150